


Un puf de mare



Nosette[®]

Baby

Spray nazal 100% natural

Apă de mare izotonică, bogată în săruri minerale și oligoelemente, **ajută la îndepărtarea microbilor și impurităților din nasul bebelușului.**

Compoziție:
Soluția conține apă de mare izotonică din Marea Adriatică, bogată în săruri minerale și oligoelemente. Oligoelementele prezente au un rol important în menținerea funcției mucoasei nazale, care ajută la buna funcționare a tractului respirator superior.

Fără conservanți.

Ambalaj:
50 ml soluție într-o sticlă cu aplicator special conceput pentru nasul bebelușului.

Scop:
Grija pentru igiena nazală este importantă încă de la naștere. Respirația pe nas este calea corectă de respirație, fiind vitală pentru dezvoltarea și creșterea copilului. Nasul uscat, impuritățile acumulate, secrețiile sau mucoasa inflamată împiedică trecerea aerului prin nasului bebelușului. Acest lucru poate cauza neliniște, plâns și iritabilitate, poate perturba somnul liniștit și procesul de hrănire. Congestia nazală, provocată de răceli sau alergii poate afecta sănătatea întregului sistem respirator.

Apa de mare, bogată în săruri minerale, are un efect benefic asupra mucoasei nazale prin susținerea mecanismelor naturale de curățare.

Când și cum se folosește Nosette[®] Baby spray nazal?
Nosette[®] Baby, cu aplicator special conceput și dimensionat pentru nările bebelușului, îndepărtează și curăță delicat secrețiile acumulate și elimină particulele infecțioase, praful, alergenii și impuritățile. Astfel ajută la decongestia nazală, în timp ce hidratează și regenerează mucoasa nazală. Nosette[®] Baby spray nazal este recomandat:

- în igiena nazală zilnică;
- înainte de alăptare;
- în răceli sau alergii;
- complementar în infecții ale urechii, asociat terapiei recomandate de către medicul dumneavoastră;
- în cazul uscării mucoasei nazale din cauza aerului rece sau cald;
- înaintea utilizării medicamentelor nazale (picături sau spray-uri).

Pulverizați Nosette[®] Baby în fiecare nară de 2-6 ori pe zi sau mai des, dacă este necesar.

După aplicare, spălați și uscați aplicatorul.

Pentru eliminarea unei cantități mai mari de impurități și secreții din

1065

cavitatea nazală, repetați procesul până când impuritățile și secrețiile sunt înnuiate suficient pentru a fi îndepărtate cu ușurință din nas.

Nosette[®] Baby are un efect delicat care susține starea fiziologică a mucoasei nazale și nu are efecte sistemice. De aceea este recomandat pentru utilizarea zilnică de la cea mai mică vârstă.

Din motive de igienă se recomandă utilizarea produsului de către o singură persoană; nu utilizați produsul împreună cu alte persoane.


Încearcă și alte produse Nosette[®]. Află cum te ajută un puf de mare pe www.nosette.ro.

| PRODUS | EFECTE | INGREDIENTE |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Nosette [®] Classic spray nazal | hidratează și curăță mucoasa nazală | apă de mare izotonică |
| Nosette [®] Strong spray nazal | decongestionează mucoasa nazală | apă de mare hipertonică |

Atenționări:
Recipientul exterior conține gaz propulsor inert (azot) care nu intră în contact cu apa de mare. Recipient sub presiune: poate exploda sub efectul căldurii. A nu se găuri sau arde, nici după utilizare. A se păstra departe de sursele de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Protejați de radiațiile solare. Nu expuneți la temperaturi de peste 50° C / 122° F. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.


Nu utilizați produsul după data înscrisă pe ambalaj.


Producător:
JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croația


 0373


Data de revizuire a prospectului:
Mai 2020


Simboluri tipărite pe ambalajul acestui produs:

 Vezi instrucțiunile de utilizare

 Producătorul

 Numărul lotului

 Data expirării

 Marcaj CE

(RO) 130004575/01

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE
AM BABY S NOS 50ML_NOSETTE (NF)_RO

jgl
Kao kap vode na dlanu

| | |
|----------------------|--|
| SAP CODE | 130004575 |
| REVISION | 01 |
| DIMENSION | 150 x 300 |
| FARMACODE | 1065, 1066 |
| ORIENTATION | NF |
| FOLDING TYPE | xx |
| FONT / SIZE | ITC Conduit |
| EAN CODE | XX |
| SPECIFICATION NUMBER | SpecPacGen000978 |
| PREPRESS | Adobe Illustrator CC |
| CREATED BY | Majda |
| MATERIAL | MASTER PRINT 60g/m2 PROLIGHT 50g/m2 SORA MEDICO 50 g/m2 SORA MEDICO 40 g/m2 |

COLOUR (number of colours): 1
Black ■

Non printing colours
Type of varnish: VD
Profile ■

SIGNATURE PRODUCTION SIGNATURE MARKET

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. draft Date: 25.04.2023. | <input type="checkbox"/> 7. draft Date: |
| <input type="checkbox"/> 2. draft Date: | <input type="checkbox"/> 8. draft Date: |
| <input type="checkbox"/> 3. draft Date: | <input type="checkbox"/> 9. draft Date: |
| <input type="checkbox"/> 4. draft Date: | <input type="checkbox"/> 10. draft Date: |
| <input type="checkbox"/> 5. draft Date: | <input type="checkbox"/> 11. draft Date: |
| <input type="checkbox"/> 6. draft Date: | <input type="checkbox"/> 12. draft Date: |

1065



1066

